

# **Camera intraorala 1.3 MP**


**- Manual de utilizare -**



**[idepo.ro/tmag.ro](http://idepo.ro/tmag.ro)**

**universul accesoriilor**

Stimate client **idepo.ro/tmag.ro** iti multumeste pentru alegerea facuta. AcBuest produs permite efectuare unor fotografii dentare necesare investigatiilor stomatologice.

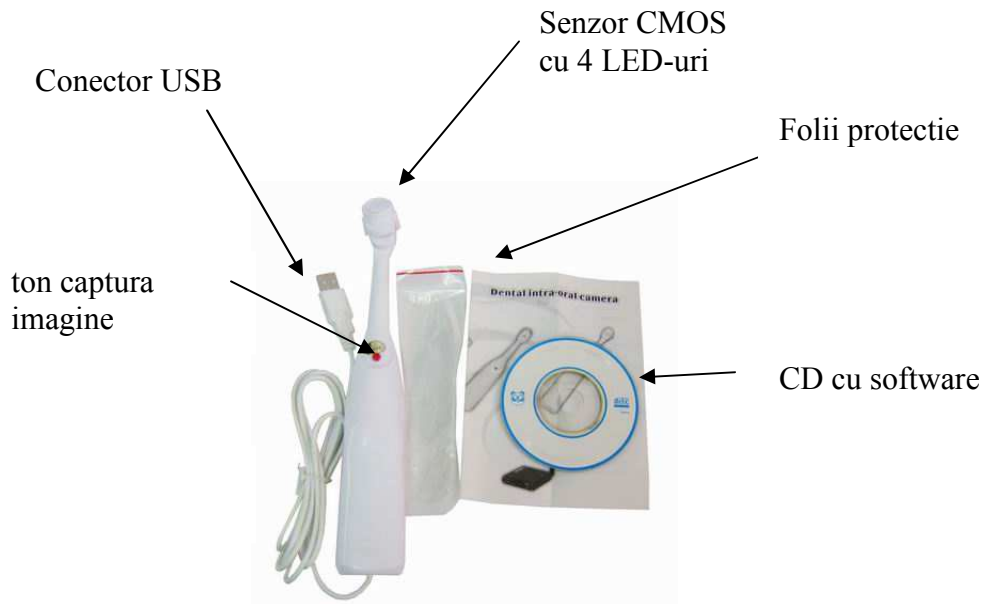

### Caracteristici tehnice

- senzor imagine CMOS
- rezolutia software: 1.300.000 pixeli
- standard IEC 601-1
- definitia: 380 linii
- sensibilitate: 0.5 lux
- nivel semnal zgomot: 52 dB
- iluminare cu 4 LED-uri
- focalizare automata
- unghi: 80 grade
- greutate: 50g

### Mod de utilizare

1. Instalati software-ul de pe CD pe PC. Pe durata instalarii un mesaj care va anunta ca software-ul nu a fost testat de Microsoft va fi afisat. Alegeti optiunea „Continue anyway” si continuati instalarea pana la finalizare
2. Introduceti camera in conectorul USB cu care este echipat PC-ul. Cele 4 LED-uri de iluminare se vor aprinde.

3. Porniti programul „USB PC Camera Plus” din meniul Program. In acest moment va aparea o fereastă in care se pot vizualiza imaginile in timp real
4. Apasati butonul „Captura imagine” ori de cate ori doriti sa faceti o fotografie
5. Salvati fotografia la final
6. Decuplati dispozitivul din PC dupa terminarea sesiunii foto.

## **Garantia – Termeni si conditii**

Este obligatorie respectarea urmatoarelor conditii de utilizare:

- temperatura de functionare: 5-45 C
- se interzice expunerea produsului la socuri mecanice si electrice sau folosirea sa in conditii de umiditate/presiune crescuta. Produsul nu este rezistent la apa. Produsele deteriorate mecanic, electric isi pierd garantia.
- este interzisa mentinerea produsului conectat la PC in mod permanent

In cazul in care produsul prezinta defecte de functionare va rugam sa ne contactati pentru remedierea acestora. Pe toata perioada garantiei este obligatorie pastrarea ambalajului original si a facturii fiscale care insoteste acest produs. Termenul de garantie este de 12 luni +5 zile (de la emiterea facturii fiscale). Garantia produsului se anuleaza in cazul unei folosiri neadecvate in conformitate cu cerintele mai sus mentionate.

Stimate client, speram ca produsele noastre sa satisfaca pe deplin nevoile dumneavoastra, iar magazinul nostru virtual sa devina prima dumneavoastra optiune pentru urmatoarele achizitii online, un magazin in care gasiti cele mai inovative si competitive produse, livrare imediata si un pret de achizitie avantajos. Pentru viitoarele comenzi va informam ca beneficiati de preturi promotionale pentru produsele aflate in sectiunea **Promotii>Clienti fideli** Codul client al dumneavoastra este TMGCL urmat de seria facturii fiscale (ex: TMGCL000456).

**Produs in conformitate cu standardul ISO9001, certificat CE, FC, TUV, DAR, RoHS.**

**Importator: Tmag Technology SRL Sediul social: Str. Becatei nr.31, ap.44, Sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/6854/2008 RO23726283 telefon: +40.740.026958 email: office@tmag.ro**